

NO. DOKUMEN : BKPS-AK09

PERALATAN PERGIGIAN – UNIT VACULYSER

KELUARAN : 5.2

TARIKH KUAT KUASA: 01/09/2020

TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN
JP/PPP/PPK	<ol style="list-style-type: none">1. Pastikan bekas untuk air liur/darah :<ul style="list-style-type: none">• Bersih dan berada ditempatnya Isikan 1/10 bahagian bekas dengan larutan disinfeksi.• Penutup botol ditutup dengan ketat2. Pasang saliva ejector ke tubing sediada.3. Buka penutup bila bekas $\frac{3}{4}$ penuh dengan air liur / darah (paras safe filling limit.) Keluarkan bekas dari rangka, dan buang air liur/ darah ke dalam mangkuk tandas.4. Bersihkan bekas tersebut dengan larutan disinfeksi
PPP/PPK	<p>Penyelenggaraan Harian.</p> <p>Rujuk BKPS-SS 08 Rekod Penyelenggaraan Harian Peralatan Pergigian Di Bilik Rawatan.</p>