

NO. DOKUMEN : BKPS-AK10

PERALATAN PERGIGIAN – UNIT *ULTRASONIC CLEANER*

KELUARAN : 5.2

TARIKH KUAT KUASA: 01/09/2020

TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN
PPP/PPK	<ol style="list-style-type: none">1. Sediakan larutan disinfeksi yang sesuai (mengikut panduan pembekal) serta mencukupi dan masukkan larutan disinfeksi mengikut paras sukatan takungan ultrasonic cleaner.2. Cuci peralatan pergigian secara manual terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam takungan ultrasonic cleaner.3. Pastikan peralatan tenggelam dalam larutan.4. Tutupkan takungan ultrasonic cleaner.5. Apabila selesai pembersihan, keluarkan peralatan dan cuci dengan air paip yang mengalir.6. Gunakan larutan baru setiap hari. Tukar larutan jika perlu (bila keruh/berubah warna) walaupun baru digunakan.