

NO. DOKUMEN : BKPS-AK04

PERALATAN PERGIGIAN - AUTOKLAF

KELUARAN : 5.3

TARIKH KUAT KUASA: 1/04/2022

TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN
PPP/PPK	<p>1. Penyelenggaraan Harian</p> <ul style="list-style-type: none">i. Bersihkan habuk dan kotoran pada permukaan dalam chamber dan luar autoklafii. Pastikan paras air di dalam <i>reservoir</i> mencukupi untuk pensterilaniii. Buangkan air kotor di dalam <i>reservoir</i> bagi autoklaf jenis bukan <i>auto discharge</i>iv. Isikan semula <i>reservoir</i> dengan air suling
PPP	<p>Rujuk : BKPS-SS08 Penyelenggaraan Harian Peralatan Pergigian</p> <p>2. Ujian Biologikal/Helix/Bowie-Dick 2 minggu Sekali</p> <p>2.1 Lakukan ujian penentukuran secara Biologikal mengikut panduan produk</p> <p>Rujuk :</p> <ul style="list-style-type: none">i. BKPS –BK 29(A) Borang Pemonitoran Ujian Biologikal Autoklafii. BKPS –BK 29(B) Borang Pemonitoran Ujian Helix Autoklafiii. BKPS –BK 29(C) Borang Pemonitoran Ujian Bowie-Dick Autoklaf <p>2.2 Selepas ujian penentukuran, indikator yang telah digunakan dibuang ke dalam “sharp container” untuk pelupusan.</p> <p>Rujuk : BKPS- AK19 Pengendalian Sisa Klinikal</p> <p>2.3 Lakukan Bowie-Dick test atau Helix test (bagi autoklaf jenis vakum)</p>
JTP	<p>3. Penyelenggaraan Tahunan</p> <p>3.1 Hubungi pihak pembekal/konsesi atau syarikat yang bertauliah untuk menjalankan penyelenggaraan</p> <p>3.2 Membuat permohonan di dalam sistem MyKKP untuk pembaharuan sijil kelayakan mengguna, sekurang-kurangnya sebulan sebelum tarikh tamat tempoh.</p>