

**BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN SELANGOR**  
**SENARAI SEMAK PENYELENGGARAAN// DIBAWAH PTJ(BUKAN KONSESI)**  
**UNIT PERGIGIAN MUDAH ALIH**  
**TAHUN : .....**

LOKASI : .....

NO SIRI : .....

NO PENDAFTARAN : .....

<b>Bil</b>	<b>Perkara</b>	<b>Pemeriksaan Tarikh</b>	<b>Catatan</b>
1	<b>Kompressor</b>		
	(i) Pastikan kebersihan		
	(ii) Pastikan unit berfungsi		
	(iii) Periksa tarikh sah sijil kelayakan menguna(CF) belum tamat Tarikh luput (CF) atau Tarikh pemeriksaan JKPP.		
2	<b>Bekas air suling</b>		
	(i) Periksa saluran air / angin		
	(ii) Pastikan bekas air Suling bersih		
3	<b>“3 way syringe” berfungsi</b>		
	a) Pastikan semburan Angin		
	b) Pastikan semburan Air		
	c) Pastikan Semburan air dan angin		
4	<b>Hanpis kelajuan tinggi</b>		
	a) Pastikan tiada kebocoran di “tubing”		
	b) Periksa putaran bur/semburan air/lampu(jika ada)		
5	<b>Hanpis “ slow speed”</b>		
	a) Pastikan tiada kebocoran angin dan air jika menggunakan’ air motor”di “tubing”		
	b) Periksa putaran bur/semburan air		
6	<b>Skaler</b> – periksa - (a) Air semburan		
	(b) Getaran		
7	<b>Pedal kawalan kaki</b>		
	a)Periksa kebocoran air dan angin		
	<b>NAMA DAN TANDATANGAN JTP</b>		

KALIBRASI DIJALANKAN SETAHUN SEKALI

Tarikh kuatkuasa : 01/09/2020