

BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN SELANGOR

Senarai Semak Penyelenggaraan Harian Peralatan Pergigian Di Bilik Rawatan

1. Amalgamator
 - Bersihkan unit dan tentukan unit berfungsi dengan baik.
2. Autoklaf
 - Periksa paras air suling di dalam tangki air (*reservoir*).
 - Tambah jika berkurangan. Paras air tidak boleh melebihi paras maksima.
 - Tukar air dalam tangki air (*reservoir*) mengikut kekerapan penggunaan.
3. Hanpis
 - Jalankan bersama bur di awal hari dan bersihkan minyak berlebihan.
 - Disinfeksi, minyakkan dan disteril di akhir hari. Cara penyimpanan mengikut arahan penggunaan oleh pembekal.
4. Unit *Light Cure*
 - Pastikan lampu *light cure* unit berfungsi. Bersihkan sisa-sisa komposit di hujung *probe* kaca dan disinfeksi selepas rawatan setiap pesakit.
5. Unit Penskaleran
 - Bersihkan hujung *scaler* hanpis selepas rawatan setiap pesakit.
 - Pasang dan keluarkan *scaler tip* secara menegak (*upright*).
 - Disinfek *scaler* hanpis dan steril setiap kali selepas digunakan.
 - Sterilkan *scaler tip* selepas setiap pesakit.
6. Unit Pergigian Tetap
- 6.1 Unit Pergigian
 - Bersihkan unit dan disinfeksi, pastikan air suling di dalam bekas sentiasa mencukupi, tambahkan jika berkurangan.
 - Bersihkan "*high vacuum*" dan saliva ejector dengan menyedut larutan disinfektan mengikut manual pengeluaran di akhir hari.
- 6.2 Kompresor
 - Bersihkan permukaan kompresor .
 - Lepaskan tekanan angin di akhir hari.
7. Unit Pergigian Mudah Alih
 - Bersihkan dan disinfeksi permukaan unit.
 - Lepaskan tekanan angin pada setiap peralatan modul di akhir hari
8. *Vaculyser*
 - Buangkan air liur/darah kedalam tangki septik jika penuh.
 - Cuci dan disinfeksi bekas tangkungan pada hujung hari

