

PUSAT PERGIGIAN KANAK-KANAK & KOLEJ LATIHAN PERGIGIAN MALAYSIA  
**SENARAI SEMAK PENYELENGGARAAN HARIAN UNIT PERGIGIAN**

Bulan : \_\_\_\_\_ Tahun: \_\_\_\_\_

Lokasi: \_\_\_\_\_

No.Siri Pendaftaran: \_\_\_\_\_

PERKARA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Catatan
1. Disinfeksikan unit pergigian dengan bahan disinfektan yang disyorkan oleh pembekal.																																
2. Pastikan air suling mencukupi.																																
3. Naikkan kerusi ke ketinggian maksima selepas rawatan.																																
4. Bersihkan 'high vacuum ejector' dan 'saliva ejector' dengan menyedut larutan disinfektan selepas digunakan.																																
<b>Tandatangan:</b>																																
<b>T.Tangan Penyelia:</b>																																

\* Penyelia perlu menyemak sekurang-kurangnya sekali seminggu.